

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування
виробу медичного призначення

Розчин стерильний на основі гіалуронової кислоти для інтравезикального введення INSTYLAN (Інстілан)

Опис.

INSTYLAN (Інстілан) безбарвний, прозорий, в'язкий гель гіалуронової кислоти нетваринного походження, стерильний, апірогенний, з фізіологічним рН. **INSTYLAN (Інстілан)** є в'язкоеластичний протектор міжклітинної речовини уротелія сечового міхура та уретри.

Склад:

Розчин стерильний на основі гіалуронової кислоти для інтравезикального введення **INSTYLAN (ІНСТІЛАН) 0,16%, 50 мл:**

Гіалуронат натрію 80 мг
Фосфатний буфер рН 7,3 до 50 мл

Розчин стерильний на основі гіалуронової кислоти для інтравезикального введення **INSTYLAN (ІНСТІЛАН) 0,24%, 50 мл:**

Гіалуронат натрію 120 мг
Фосфатний буфер рН 7,3 до 50 мл

Розчин стерильний на основі гіалуронової кислоти для інтравезикального введення **INSTYLAN (ІНСТІЛАН) 0,80%, 50 мл:**

Гіалуронат натрію 400 мг
Фосфатний буфер рН 7,3 до 50 мл

Розчин стерильний на основі гіалуронової кислоти для інтравезикального введення **INSTYLAN (ІНСТІЛАН) 1,6%, 50 мл:**

Гіалуронат натрію 800 мг
Фосфатний буфер рН 7,3 до 50 мл

Показання до застосування

Розчин призначено для тимчасового захисту та відновлення слизової оболонки сечового міхура при різних маніпуляціях (уретро-цистоскопія, променева терапія та інше).

Хронічний/рецидивуючий цистит, променеви́й цистит, інтерстеціальний цистит, гіперактивний сечовий міхур, затримка сечі або утворення пухлин, що викликані циститом.

Механізм дії.

Гіалуронова кислота входить до складу всіх тканин організму і є найбільш значущим компонентом міжклітинного матриксу і становить при цьому істотну частку глікозаміногліканів уротелія сечового міхура та уретри (сечовипускного каналу).

При введенні в порожнину сечового міхура створює в'язкоеластичну плівку на поверхні слизової оболонки, що захищає її від зовнішніх впливів при різного

роду маніпуляціях (уретроскопія , цистоскопія, ТУР передміхурової залози і сечового міхура, променева терапія органів малого тазу і т.д.).

Протипоказання

- Підвищена чутливість до компонента.
- Вагітні жінки та жінки, які годують грудьми
- Діти

Взаємодія.

Відзначено несумісність між гіалуронатом натрію і четвертинними солями амонію, такими як бензалконію хлорид. Не слід допускати контакт протектору з такими препаратами або з медичними та хірургічними інструментами, обробленими такими препаратами.

Спосіб застосування та дози.

INSTYLAN (Інстілан) призначений для інстиляції в сечовий міхур, яку повинен виконувати лікар, що має спеціальну підготовку, у спеціально обладнаному приміщенні, з дотриманням всіх правил асептики.

INSTYLAN (Інстілан) вводиться внутрішньоміхурово, 1 раз на тиждень. Курс складає від 4-х до 12 інстиляцій.

Перед застосуванням температура пакету повинна бути не менше 20 ° С.

Перед введенням **INSTYLAN (Інстілан)** слід спорожнити сечовий міхур.

INSTYLAN (Інстілан) вводиться в порожнину сечового міхура за допомогою урологічного катетера на строк від 30 хвилин до 2 годин.

Застереження.

INSTYLAN (Інстілан) призначений тільки для введення в порожнину сечового міхура за допомогою урологічного катетера.

Перед використанням перевіряйте цілісність і герметичність пакета. При порушенні цілісності або наявності ушкоджень застосування препарату недопустимо.

Не використовуйте після закінчення терміну придатності.

Виріб призначений тільки для одноразового застосування.

Уникати ін'єкції в кровоносні судини.

Упаковка.

Пакет полімерний з насадкою під уретральний катетер в пачці з картону.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 30 °С, в захищеному від сонця місці, Не заморожувати. Зберігати в місцях недоступних для дітей. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Термін придатності. 2 роки.